

MERUSAL Healthcare

# PRODUKT INFORMATION

## MERUSAL SMART WIPES 2 IN 1



# MERUSAL SMART WIPES

2 IN 1

## Produktbeschreibung

MERUSAL SMART WIPES 2 in 1 sind gebrauchsfertige Einwegtücher zur alkoholfreien Hände- und Flächendesinfektion mit breitem Wirkungsspektrum und gleichzeitig guter Hautverträglichkeit. Die Tücher bestehen aus 100% biologisch-abbaubarem Tuchmaterial mit optimaler Wirkstoff abgabe.

## Anwendung

**Wichtig!** vor der Desinfektion sollten zuerst die zu desinfizierenden Flächen/Gegenstände bzw. Hände auf Verschmutzungen geprüft und gereinigt werden. Zur Flächendesinfektion die Fläche vollständig benetzen und gegebenenfalls mit einem zweiten Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Unbedingt die Einwirkzeiten beachten.

Zur Händedesinfektion die sauberen und trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Gegebenenfalls ein weiteres Tuch nutzen.

BAUA Reg. Nr. N-101654

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Zusammensetzung

Wirkstoff e in 100g Tränklösung:

0,8g Didecyldimethylammoniumchlorid,  
0,5g 2-Phenoxyethanol

## Chemisch-physikalische Daten

Farbe: trüb, farblos  
Zustand: flüssig  
pH-Wert: 5,5  
Dichte: ca. 1g/ml

## Lagerung und Haltbarkeit

Behältnisse gut verschlossen halten.  
Haltbarkeit nach Produktion: 2 Jahre  
Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage

## Einwirkzeiten

Hygienische Händedesinfektion EN 1500 60 Sek.

### Flächendesinfektion:

Bakterizid/levurozid EN 13727 /13624  
(hohe Belastung) 30 Sek.  
Begrenzt viruzid nach EN 14476  
(geringe Belastung) 60 Sek.

## Gutachten

Unser Produkt ist umfangreich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

## Lieferformen & Gebinde

Artikel Nr.	Gebinde	Inhalt	VE
MSD01-S048	Flowpack	48 Tücher	26

## Hersteller

MERUSAL Healthcare Tel: +49 8261 7625 97 0  
Hermelestr. 1 E-Mail: info@merusal.com  
87719 Mindelheim Internet: www.merusal.com